

Przed użyciem należy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. Aby wyrób działał skutecznie podczas używania, należy stosować go zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji. W celu uzyskania dodatkowych informacji, należy zasięgnąć porady lekarza.

Instrukcję należy zachować w celu poprawnego używania wyrobu.

**WATA OPATRUNKOWA****Wata bawełniano-wiskozowa**

Klasa I, Reguła 1

**Opis wyrobu:**

Wata opatrunkowa jako materiał opatrunkowy charakteryzuje się dużą chłonnością. Występuje w postaci zbioru luźnych włókien przylegających równolegle do siebie. Wata opatrunkowa produkowana jest z mieszanki oczyszczonych, odtłuszczonych włókien bawełny i/lub włókien wiskozowych. Charakteryzuje się barwą białą lub kremową oraz znaczną puszystością.

Wata opatrunkowa jest wyrobem jednorazowego użytku.

**Przeznaczenie wyrobu:**

Wata opatrunkowa przeznaczona jest do:

- przemywania otarć naskórka, skaleczeń oraz miejsc do iniekcji – po nasączeniu jej płynnymi środkami dezynfekującymi
- do okładów i kompresów
- oraz
- jako materiał chłonny do celów opatrunkowych i higienicznych, jako podkład pod opatrunek gipsowy

**Sposób użycia:**

- W celu użycia do przemywania naskórka należy oddzielić odpowiednią ilość waty opatrunkowej, nasączyć odpowiednim środkiem (płynem) i przetrzeć naskórek. Nie używać powtórnie. Po użyciu wyrzucić do odpowiedniego pojemnika lub postąpić zgodnie z procedurą obowiązującą w Zakładzie Opieki Zdrowotnej.
- W celu użycia do okładu lub kompresu należy oddzielić odpowiednią ilość waty opatrunkowej, nasączyć odpowiednim środkiem (płynem) i przyłożyć do powierzchni ciała. W razie potrzeby zamocować bandażem. Nie używać powtórnie. Po użyciu wyrzucić do odpowiedniego pojemnika lub postąpić zgodnie z procedurą obowiązującą w Zakładzie Opieki Zdrowotnej.
- W celu użycia jako materiał chłonny do celów opatrunkowych i higienicznych należy oddzielić odpowiednią ilość waty opatrunkowej i umieścić na ciele w miejscu wysięku. Nie używać powtórnie. Po użyciu wyrzucić do odpowiedniego pojemnika lub postąpić zgodnie z procedurą obowiązującą w Zakładzie Opieki Zdrowotnej.
- W celu użycia jako podkład pod opatrunek gipsowy należy oddzielić odpowiednią ilość waty opatrunkowej i umieścić na powierzchni ciała w miejscu nakładania opatrunku gipsowego. Nie używać powtórnie. Po użyciu wyrzucić do odpowiedniego pojemnika lub postąpić zgodnie z procedurą obowiązującą w Zakładzie Opieki Zdrowotnej.

**Przeciwwskazania:**

Nie używać powtórnie.

**Ostrzeżenia!**

Ze względu na to, że wata opatrunkowa jest wyrobem niejałowym i włóknistym, nie należy stosować jej bezpośrednio na rany. Zawsze należy zabezpieczyć ranę opatrunkiem jałowym.

**Przechowanie:**

Wyroby należy przechowywać w miejscach w miejscach suchych i zapewniających zabezpieczenie przed zawilgoceniem, poplamieniem, zabrudzeniem, zniszczeniem przez pleśń, bakterie, mole i inne czynniki zewnętrzne, także przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.



**Skład surowcowy:**

- włókno bawełniane
- włókno wiskozowe

**LOT:**

**Wytwórca:**

**REF:**

**„TOMCOTTON” Grad E.  
97-200 Tomaszów Mazowiecki  
ul. Spalska 110  
tel./fax 44 724 45 61  
NIP 773-20-67-220**

