



**PURESITE®**

Zastosowanie wyrobu: urządzenie do transferu leków niebezpiecznych i toksycznych, przeznaczone jest do używania ze strzykawkami i wyrobami wyposażonymi w złącze typu luer lock.

**CHROŃ SIĘ PRZED LEKAMI  
TOKSYCZNYMI - UŻYWAJ PURESITE®**

# CHROŃ SIĘ PRZED LEKAMI TOKSYCZNYMI - UŻYWAJ PURESITE®

## PRZYGOTOWANIE LEKU



Połącz żeńską końcówkę luer lock PureSite® ze strzykawką.



Po połączeniu PureSite® z dojsciem bezigłowym, odwróć fiolkę w celu pobrania leku.



Nałóż nasadkę ochronną na końcówkę męską PureSite®.

## PODANIE LEKU



Po zdjęciu nasadki ochronnej, podłącz PureSite® do dojscia bezigłowego.



Po podaniu leku, odłącz PureSite® od dojscia bezigłowego.



Wyrzuć strzykawkę z PureSite® zgodnie z zaleceniami.

Klasyfikacja leków niebezpiecznych wg NIOSH\*

### GRUPA 1

**substancje rakotwórcze dla człowieka:**

afatanibpaklitaksel, aksytinibpertuzumab, amsakrynapomalidomid, bendamustynaregorafenib, bleomycynawemurafenib, karboplatyna, carfilzomib, cisplatyna, cyklofosfamid, desatinib, epirubicyna, etopozyd, 5-fluorouracyl, imatinib, nilotinib, thiotepa, pomalidomid

PURESITE® - urządzenie transferowe (270724)

### GRUPA 2A

**substancje prawdopodobnie rakotwórcze dla człowieka:**

karmustyna, chloramfenikol, cisplatyna, doksorubicyna, tenipozyd

PURESITE® - nasadka ochronna (270725)

\*STANDARDY JAKOŚCIOWE W FARMACJI ONKOLOGICZNEJ POLSKIEGO TOWARZYSTWA FARMACEUTYCZNEGO. 2018

AESCLAP CHIFA sp. z o.o. | ul. Tysiąclecia 14 | 64-300 Nowy Tomyśl,  
tel. (61) 44 20 100 | fax (61) 44 23 936 | [www.bbraun.pl](http://www.bbraun.pl)

AESCLAP CHIFA - firma grupy B. Braun

HC-BLN-015 01/2020