


Podłączanie antykoagulantu z użyciem łącznika AC

Przedstawiony w tej skróconej instrukcji łącznik AC służy do podłączania antykoagulantu do systemu Spectra Optia z użyciem łącznika luer.

Uwaga: Ekran systemu Spectra Optia przedstawia podłączenie antykoagulantu przy użyciu nakłuwacza z komorą kroplową. Postępując według niżej podanej instrukcji należy podłączyć antykoagulant, używając zestawu drenów z łącznikiem luer.

Postępując zgodnie z poniższą instrukcją, podłączyć pojemnik AC do linii AC używając łącznika luer.

- 1** Podłączyć łącznik luer na linii AC do pojemnika AC.

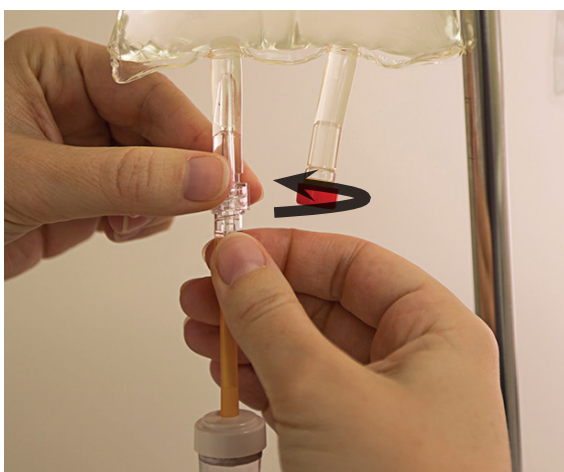

- 2** Przełamać łamliwe łącze na pojemniku AC. Wygiąć w obie strony, aby zapewnić całkowite przełamanie złącza.

